

**sans
BPA**
(Bisphénol A)

Nékicool®



Que contient le kit de seringues nasales Nékicool®?



1 boîte de transport



2 seringues nasales




1 brosette de nettoyage



1 récipient de 30 ml


Comment utiliser le mouche bébé Nékicool®?

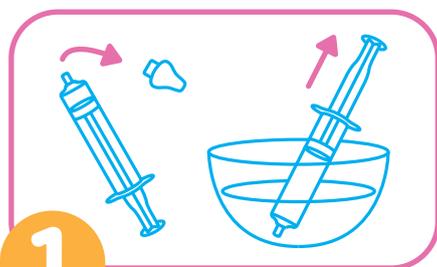

1

PRÉPARATION


- Retirer l'embout en silicone, aspirer 5 mL de sérum physiologique puis remettre l'embout.
- Assoir l'enfant la tête légèrement vers l'avant.
- Placer hermétiquement le mouche bébé sur une des narines.

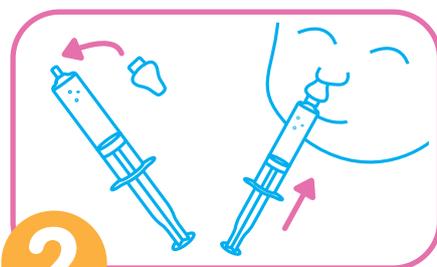

2

UTILISATION

- Protéger bébé des sécrétions nasales à l'aide d'une serviette.
- Appuyer sur le piston de la seringue doucement et régulièrement pour décongestionner le nez.
- Répéter l'opération avec l'autre seringue pour la seconde narine.

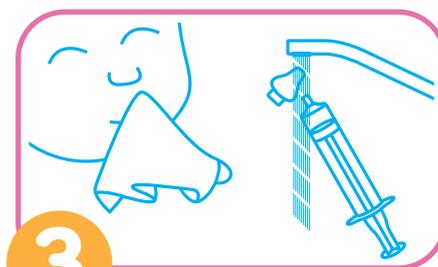

3

FIN

- Essuyer le nez avec une serviette ou une lingette douce.
- Nettoyer les seringues et les embouts à l'eau chaude et au savon.
- Rincer à l'eau claire puis faire sécher à l'air libre.

Offre spéciale

4,20€ HT/U dès 12 unités pour toute commande de 48 lots de 2 seringues

12 unités = 5€ HT/Unité | 24 unités = 4,50€ HT/U | 48 unités = 4,20€ HT/U | 96 unités = 3,90€ HT/U | > 144 unités = 3,50€ HT/U

Frais de port = 9,90€ | Franco à partir de 48 unités ou pour une commande de 150€ HT sur l'ensemble du catalogue Nékicool®.

Distribué par : Panacée SAS - 14 rue des champs 67170 Mittelhausen - contact@panaceebox.fr