

sans
BPA
(Bisphénol A)

NékiCool



Pourquoi choisir le mouche bébé NékiCool®?

Décongestion rapide et efficace

pour éliminer les différentes sources de gênes (nez qui coule, nez bouché, éternuements), éviter les complications ORL et permettre à bébé de mieux dormir.

Hygiène parfaite

Plus besoin d'aspirer le mucus avec la bouche ou une poire difficile à nettoyer.

Finis l'appréhension !

Avec l'embout en silicone souple, le nettoyage nasal se fait tout en douceur et en toute simplicité.

Comment utiliser le mouche bébé NékiCool®?



1

PRÉPARATION


- Retirer l'embout en silicone, aspirer 5 mL de sérum physiologique puis remettre l'embout.
- Assoir l'enfant la tête légèrement vers l'avant.
- Placer hermétiquement le mouche bébé sur une des narines.



2

UTILISATION

- Protéger bébé des sécrétions nasales à l'aide d'une serviette.
- Appuyer sur le piston de la seringue doucement et régulièrement pour décongestionner le nez.
- Répéter l'opération avec l'autre seringue pour la seconde narine.

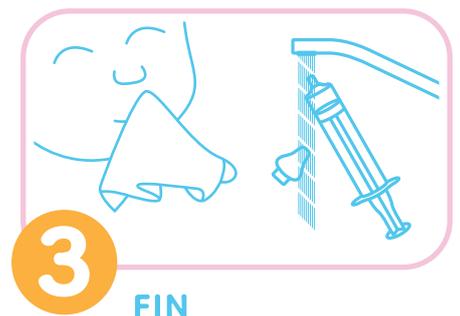

3

FIN

- Essuyer le nez avec une serviette ou une lingette douce.
- Nettoyer les seringues et les embouts à l'eau chaude et au savon.
- Rincer à l'eau claire puis faire sécher à l'air libre.

12 unités = 3,50€ HT/Unité | 24 unités = 3€ HT/U | 48 unités = 2,80€ HT/U | 72 unités = 2,59€ HT/U | 96 unités = 2,49€ HT/U
144 unités = 2,39€ HT/U | 400 unités = 2€ HT/U

Frais de port = 9,90€ | Franco à partir de 48 unités ou pour une commande de 150€ HT sur l'ensemble du catalogue NékiCool®.

Distribué par : Panacée SAS - 14 rue des champs 67170 Mittelhausen - contact@panaceebox.fr